




極薄プラスチックグローブ 100枚入

ディスポ手袋

- 感染予防や介護などの作業に最適なディスポーザブルタイプ
- 内側コート加工で、手に貼りつかず、**着脱スムーズ**
- 細かな作業に便利な**極薄素材**で高いフィット性
- アレルギー体質の方にやさしい**ラテックスフリー・パウダーフリー**

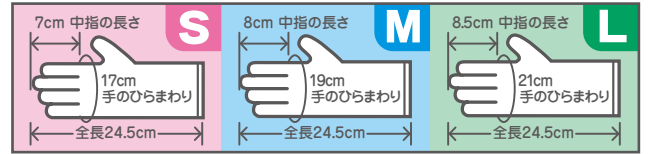


コピーしてそのまま使える!



感染性廃棄物*チェックポイント

● 廃棄物の区分¹⁾

* 医療関係機関等から生じ、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物

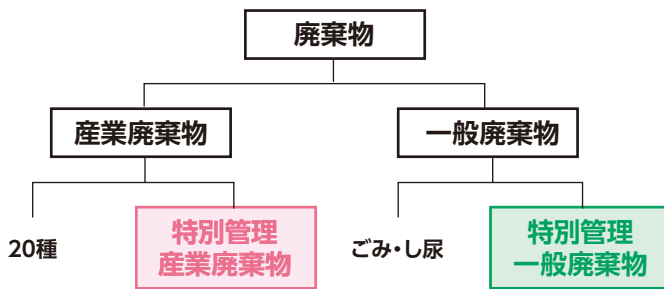

感染性産業廃棄物

特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物
(血液、使用済の注射針、破損したガラス容器、
血液の付着したゴム手袋など)

感染性一般廃棄物

特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物
(血液の付着したガーゼ、ペーパータオル、包帯など)

感染性廃棄物は他の廃棄物と分別しましょう!

● バイオハザードマーク¹⁾

バイオハザードマークは、関係者が感染性廃棄物であることを識別できるように、容器への表示を推奨されているマーク

使い分け			
内容物	鋭利なもの(注射等) 分別排出が困難なもの	固形状のもの (血液が付着したガーゼ等)	液状または泥状のもの (血液等)

CHECK!

院内で当てはまる
廃棄物を
書き込んでみましょう!

排出時点で適切な容器に入れましょう!

¹⁾ 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成29年3月)環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 一部 改編

● 手袋の着脱方法

着け方

手指衛生

手袋の手首の部分をつかんではめる

反対の手も同様にはめる

装着後、両手の指を組んで指と手袋のすき間をなくす



外し方

手袋の外側のみをつかむ

手袋が裏返るように外す

外した手袋を丸め手首内側に手をかける

丸めた手袋を持ったまま手袋が裏返るように外す

手指衛生

正しく着脱して感染性廃棄物を扱きましょう!